


# Reanimeren met HeltiQ Beaty



**LET OP!** Test voor start de Beaty door deze in te drukken. Wanneer je een piepton hoort kun je de Beaty gebruiken.


## 4. Pak de HeltiQ Beaty

Plaats de Beaty in de siliconen adapter, voor het creëren van een breder drukvlak. Ontbloot de borstkas en leg de Beaty in het midden van de borstkas.

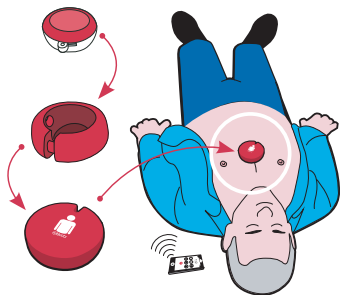


## 1. Controleer bewustzijn van het slachtoffer

Schud voorzichtig aan de schouders en vraag (luid): 'Gaat het?' Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos.

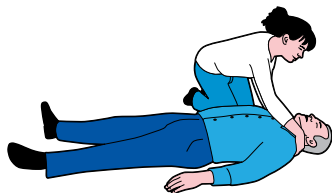


## 2. Bel direct 112

Omstanders aanwezig? Vraag hen 112 te bellen en een AED te halen indien beschikbaar. Alleen? Bel 112, leg de telefoon naast het slachtoffer op speakerfunctie. Vraag om een ambulance. Zeg dat het slachtoffer niet reageert. Volg de instructies van de meldkamermedewerker.

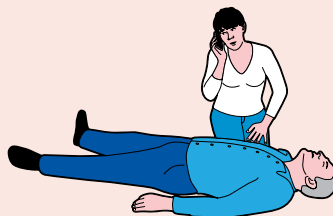


## 5. Start met 30 borstcompressies

Plaats je handen bovenop de Beaty. Druk met de Beaty het borstbeen 5 á 6 cm in. Bij het juist uitvoeren van de diepte geeft de Beaty een piep. Doe dit 30 keer in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut.

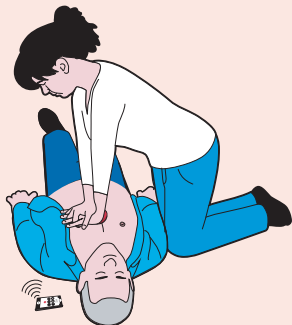


## 6. Beadem 2 keer

Doe de kinlift, kantel het hoofd naar achteren en knijp de neus dicht. Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt. Beadem in totaal 2 keer. Dit mag maximaal 10 seconden het geven van compressies onderbreken. Ga door met reanimeren met de Beaty en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.

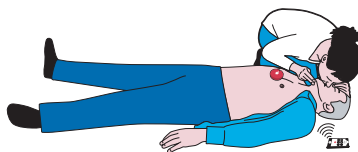

## 3. Controleer ademhaling

Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd naar achteren om de luchtwegen te openen. Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift). Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden. Geen of geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal een AED indien deze DIRECT beschikbaar is.

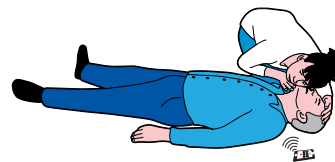

## 7. Gebruik de AED

Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt. Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas. Volg de opdrachten van de AED op totdat de ambulancezorgverleners arriveren en zeggen dat je mag stoppen. Blijf de Beaty gebruiken bij de borstcompressies.

