
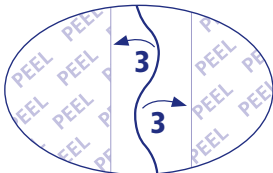
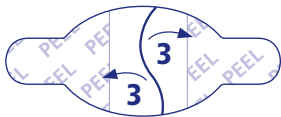
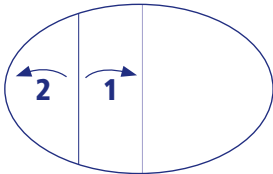


Toepassing

HeltiQ Hydrogel pleisters

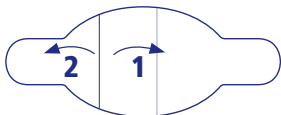

- Koel de brandwond met zacht stromend lauw water
- Maak de te behandelen plek schoon en droog
- Haal de hydrogel pleister uit de verpakking en verwijder één helft aangeduid met nummer 1 van de beschermfolie aan de onderkant van de hydrogel pleister
- Plak de vrije kant van de hydrogel pleister op de wond en verwijder daarna de andere helft van de beschermfolie, aangeduid met nummer 2
- Druk de hydrogel pleister enkele seconden licht en gelijkmatig aan en zorg dat de randen goed vastplakken
- Verwijder tenslotte voorzichtig vanuit het midden de beschermfolie aan de bovenkant, aangeduid met nummer 3